



Biotecnología marina.
La ciencia del mar a tu alcance.

Naso Faes® es una gama de productos nasales a base de ingredientes marinos testados para aportar beneficios saludables, garantizando así su alta tolerabilidad a nivel celular y asegurando su eficacia en la mucosa nasal.

El agua de mar 100% natural ha demostrado en numerosos estudios poder influir en la restauración del funcionamiento normal de la mucosa.

Los productos Naso Faes® pueden ser utilizados como complemento en el tratamiento de sinusitis, congestión, secreciones densas, rinoфарингитis, rinitis alérgica, sequedad nasal y post-cirugía.



Distribuido por:
FAES FARMA S.A.
Máximo Aguirre, 14 - 48940,
Leioa (Bizkaia), España

YSLAB
2 Rue Félix Le Dantec
29000, Quimper, France

Última revisión del prospecto: Junio 2018



FLUID+

+ 12 años

Composición

- Agua de mar hipertónica 100% natural - *Solución Marina Opti-Ionic*
- Polisorbato 80
- Sin conservantes



FLUID+

pediátrico

6 meses a 12 años

¿Qué propiedades tiene?

Naso Faes® Fluid+ Spray nasal limpia, fluidifica el moco y despeja la **nariz taponada y congestionada.**



Naso Faes® Fluid+ Pediátrico Spray nasal limpia, fluidifica el moco y despeja la **nariz taponada y congestionada de los niños.**



Naso Faes® Triple Acción+:
· Crea una capa protectora e hidratante con efecto barrera
· Repara la **mucosa seca y dañada**
· Hidrata, limpia y suaviza



¿Cómo actúa?

Naso Faes® Fluid+ gracias a la combinación de la *Solución Marina Opti-Ionic* con un agente tensioactivo suave, favorece la fluidificación del moco denso facilitando su eliminación.

Su aplicador Dinamic Jet ha sido especialmente desarrollado para facilitar la evacuación del moco y favorecer la hidratación del seno nasal.

Su válvula especial "One-Way" garantiza la no contaminación del contenido durante su uso y a lo largo de toda la vida del producto.

Naso Faes® Fluid+ Pediátrico gracias a la combinación de la *Solución Marina Opti-Ionic* con un agente tensioactivo suave, favorece la fluidificación del moco denso facilitando su eliminación.

Se aplica con un microdifusor nasal que libera el contenido en finas partículas, facilitando la evacuación del moco y favoreciendo la hidratación del seno nasal. Su tope de seguridad protege la delicada nariz de los niños.

Su válvula especial "One-Way" garantiza la no contaminación del contenido durante su uso y a lo largo de toda la vida del producto.

Naso Faes® Triple Acción+ gracias a la *Solución Marina Ideal-Ionic* enriquecida con Ácido Hialurónico, ayuda a calmar las irritaciones e hidrata la mucosa en caso de sequedad nasal.

Confiere una barrera protectora que favorece los procesos de curación de heridas y reparación de la mucosa dañada, evitando así la irritación, picazón, sangrado de la nariz o incluso la formación de costras debido a las agresiones externas (polvo, alérgenos, contaminación, bacterias, virus).

El exclusivo Spray Pump System libera la cantidad exacta de producto en finas partículas en cada aplicación, lo que permite optimizar el contenido (300 dosis). Su válvula especial "Air Flow" garantiza la no contaminación del contenido durante su uso y a lo largo de toda la vida del producto.

NOFAE_NZDIVESV3

Client: FAES

Gamme

Cible:

Produit: ----

Volume: ---- mL

Gencod:

Code AC imprimé: NOFAE_NZDIVESV1

Date:

Taille: ---- mm

QUADRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TONS DIRECTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	293C	225C	-	-
TONS COMPOSÉS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-	-	-	-

ATTENTION CECI N'EST PAS UN DOCUMENT DE PHOTOGRAVURE Ce document ne peut en aucun cas être considérée comme prêt à flasher, mais seulement comme un document technique. Les couleurs de ce document sont la visualisation en sortie laser des tons Pantone ou Quadri. Avant de lancer la réalisation des films, il est impératif d'effectuer un travail de gravure qui consiste à adapter ce document aux contraintes d'impression (traitement des défoncees et recouvrement de couleurs, adaptation des tramés aux contraintes techniques, interprétation ou recherche de bendays...)



FLUID+



FLUID+
pediátrico



TRIPLE ACCIÓN+

¿Cuándo se recomienda su uso?

En casos de:

Rinitis alérgica, sinusitis, catarro persistente, mucosidad densa y otras patologías nasales asociadas a la **acumulación de moco que requieran su fluidificación.**

En caso de exposición a agentes alérgenos externos como polen, polvo, gérmenes, pelo de mascota, etc. para garantizar su eliminación.


En casos de:

· Mucosa irritada y dañada por la sequedad asociada a rinitis alérgica, sinusitis, intervenciones quirúrgicas, efectos secundarios de otros medicamentos, aire acondicionado o calefacción, etc.

¿Cómo utilizarlo?



Aplicar con la cabeza erguida.
Inclinar el aplicador ligeramente y pulverizar 1 ó 2 veces, durante 1 ó 2 segundos en cada fosa nasal.
Repetir la operación 2 ó 3 veces al día mientras dure la congestión.
Limpiar el aplicador nasal con agua templada y jabón neutro después de cada uso y aclarar.

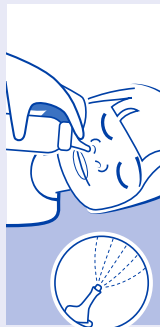

Inclinar la cabeza del niño hacia un lado y aplique Naso Faes® Fluid+ pediátrico en la fosa nasal del lado opuesto.
Pulverizar 1 ó 2 veces, durante 1 ó 2 segundos en cada fosa nasal. Repetir la operación 2 ó 3 veces al día mientras dure la congestión.
Limpiar el aplicador nasal con agua templada y jabón neutro después de cada uso y aclarar.



Aplicar con la cabeza erguida.
Inclinar el aplicador ligeramente y pulverizar 1 ó 2 veces en cada fosa nasal.
Repetir la operación 5 ó 6 veces al día mientras dure la sequedad, picor o molestias.
Limpiar el aplicador nasal con agua templada y jabón neutro después de cada uso y aclarar.

En caso de que los síntomas perduren o no se aprecie mejoría pasados 5 días, consulte con su médico o farmacéutico.

Puede utilizarse mientras los síntomas persistan. Si tiene cualquier duda consulte con su médico o farmacéutico.

- Naso Faes® Fluid+ / Fluid+ Pediátrico no debe de ser compartido con otros usuarios. Una vez agotado el contenido deseche el envase. No utilizar en caso de alergia, intolerancia o sensibilidad a alguno de sus ingredientes.
- Precauciones: Atención, envase presurizado, puede estallar si se somete a elevadas temperaturas. Mantener fuera de fuentes de calor, chispas, llamas o superficies con calor. No fumar cerca del dispositivo. No perforar o quemar incluso después de usado.
- Mantener protegido de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar el producto en su envase original entre 8°C y 35°C.

- Naso Faes® Triple Acción+ no debe de ser compartido con otros usuarios. Una vez agotado el contenido deseche el envase. No utilizar en caso de alergia, intolerancia o sensibilidad a alguno de sus ingredientes. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar el producto en su envase original entre 8°C y 35°C.

Fecha de la primera obtención del marcado CE: 12/07/2016



Distribuido por: FAES FARMA S.A.
Máximo Aguirre, 14 - 48940, Leica (Bizkaia), España

YSLAB
2 Rue Félix Le Dantec
29000, Quimper, France

Client: FAES

Gamme

Cible:

Produit: ----

Volume: ---- mL

Gencod:

Code AC imprimé: NOFAE_NZDIVESV1

Date:

Taille: ---- mm

QUADRI				
TONS DIRECTS				
TONS COMPOSÉS				

ATTENTION CECI N'EST PAS UN DOCUMENT DE PHOTOGRAVURE Ce document ne peut en aucun cas être considérée comme prêt à flasher, mais seulement comme un document technique. Les couleurs de ce document sont la visualisation en sortie laser des tons Pantone ou Quadri. Avant de lancer la réalisation des films, il est impératif d'effectuer un travail de gravure qui consiste à adapter ce document aux contraintes d'impression (traitement des défoncees et recouvrement de couleurs, adaptation des tramés aux contraintes techniques, interprétation ou recherche de bendays...)